

Waga elektroniczna łazienkowa Janina BE 805 / BE 822



BE 822



BE 805

Dziękujemy za zakup wysokiej klasy wagi kuchennej firmy ADE. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek.

1. Warunki użycia.

Zaleca się przeprowadzenie pomiaru bez ubrania. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, najlepiej przeprowadzać pomiar zawsze o tej samej porze dnia.

Firma ADE Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wagi. Niniejsza waga przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do celów handlowych, szpitalnych, itd.

2. Przed ważeniem.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy na opakowaniu i na wadze nie ma widocznych śladów uszkodzeń. Nie wolno używać wagi, jeśli jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem.

Zasady bezpieczeństwa: Waga nie powinna być używana przez dzieci, osoby niepełnosprawne bez opieki osób dorosłych.



Należy uważać, aby ciężkie przedmioty nie upadły na szklaną powierzchnię wagi.



Wagę należy ustawić na równej i twardej powierzchni.

Należy stanąć na środku wagi; dzięki temu waga nie przechyli się.



Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami, aby się nie poślizgnąć.



Wagę należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać silnych środków czyszczących. Nie zanurzać wagi w wodzie.

Przygotowanie wagi:

Włożyć baterie do przegródki zgodnie z polaryzacją.

Ustawić odpowiednią jednostkę ważenia (kg/lb/st) za pomocą czarnego przycisku znajdującego się obok przegródki na baterie. Zaleca się ustawienie jednostki ważenia obowiązującej w danym kraju.

4. Ważenie

Uruchom wagę za pomocą funkcji tap-on (tupnij lekko stopą środek platformy). Na wyświetlaczu pojawi się „8888”, a po kilku sekundach pojawi się „0.0 kg”. Waga jest gotowa do użycia.

Stań na środku wagi i nie ruszaj się. Pomiar zostanie wyświetlony po kilku sekundach.

Po zakończeniu pomiaru zejź z wagi. Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.

5. Informacje o błędach

„Err” Przeciążenie.

Przekroczono zostało **maksymalne obciążenie wagi 180 kg.**

Należy natychmiast zejść z wagi.

„Lo” Słaba bateria. Należy wymienić baterie na nowe.

6. Dane techniczne.

Maksymalne obciążenie:	180 kg
Dokładność:	100 g
Wymiary:	300 x 320 x 20 mm
Baterie:	4 X AAA 1,5V

Niniejszy produkt jest zgodny z Rozporządzeniem 2004/108/EC.

Uwaga: Silne oddziaływanie elektromagnetyczne może wpłynąć na wyświetlane wartości, np. gdy używamy urządzenia radiowego w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Po usunięciu źródła interferencji, można ponownie użyć produktu zgodnie z przeznaczeniem. Może zajść potrzeba ponownego włączenia urządzenia.

7. Utylizacja baterii

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to możliwe należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Na bateriach zawierających substancje szkodliwe znajdują się następujące symbole:

Pb baterie zawierają ołów

Cd baterie zawierają kadm

Hg baterie zawierają rtęć

8. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

kartagwarancyjna

- Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	