

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga niemowlęca ADE M 10618

Elektroniczna waga niemowlęca ADE M 10618



Waga niemowlęca

ADE M 10618

Waga M 10618 służy do ważenia niemowląt w warunkach szpitalnych oraz domowych. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Elementy i funkcje

Przycisk 1	ON/TARE – Włączanie / odejmowanie wartości tarowanej
Przycisk 2	UNIT - Zmiana jednostki ważenia (kg, lb)
Przycisk 3	MEM – Zapisywanie wyniku

Instalacja wagi

Wkładanie baterii

Otworzyć przegródkę na baterie znajdującą się na spodzie i włożyć 4 baterie LR6 / AA 1.5 V 8 zgodnie z polaryzacją (baterie nie są dołączone do przesyłki). Szczelnie zamknąć przegródkę.

Ustawienie wagi

Wagę używać tylko na równej, twardej powierzchni.

Sprawdzić, czy wszystkie nóżki wagi dotykają podłoża. W razie konieczności można odpowiednio wyregulować nóżki.

Uwaga! Upewnić się, że waga jest stabilna. Zapewni to bezpieczeństwo pomiaru oraz wiarygodność wyników.

Zasilanie

Waga zasilana jest sieciowo lub bateryjnie. Aby włączyć wagę, należy nacisnąć przycisk ON / TARE.

W przypadku zasilania sieciowego używać wyłącznie zasilacza dołączonego do przesyłki (6V / 500 mA). Gniazdko zasilacza znajduje się z tyłu obudowy.

Przed podłączenie upewnić się, że napięcie zasilacza odpowiada napięciu lokalnemu. Jeśli nie, nie podłączać zasilacza!!

Ważenie

Przed ważeniem

Dziecko można ważyć na miękkiej macie lub ręczniku. Wagę tych przedmiotów można starować, aby nie wpływała na wynik pomiaru dziecka.

1. Położyć matę/ręcznik na szali **PRZED** włączeniem wagi. Waga okrycia zostanie automatycznie starowana.
2. Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć wagę.
3. Poczekać aż wyświetli się „0.00” po przeprowadzeniu automatycznego testu funkcji. Waga jest gotowa do użycia.
4. Jeśli mata/ręcznik zostanie położona po włączeniu wagi, ponownie nacisnąć przycisk ON/TARE. Waga okrycia zostanie starowana, a na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.
5. Położyć dziecko na szali.
6. Gdy wynik pomiaru ustabilizuje się, automatycznie zacznie migać. Jeśli dziecko pozostanie na wadze, wynik będzie wyświetlany przez kolejne 5 minut, po czym waga wyłączy się automatycznie. Jeśli dziecko zostanie zdjęte z wagi w trakcie wyświetlania wyniku, wartość pomiaru automatycznie wskaże „0.00” przed automatycznym wyłączeniem po 5 minutach.
7. Aby wyłączyć wagę ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/TARE przez ok. 3 sekundy.

Funkcja Memory

Waga wyposażona jest w funkcję Memory (Pamięci), aby przeczytać wynik po zdjęciu dziecka z wagi. Zapisanie wyniku umożliwia jego przywołanie w dogodnym momencie.

1. Włączyć wagę, jak opisano powyżej.
2. Po wykonaniu pomiaru, gdy wynik ustabilizował się i miga, nacisnąć przycisk MEM. Na wyświetlaczu pojawi się opis **SET** i **mem**, co oznacza, że wynik została zapisany.
3. Po zdjęciu dziecka z wagi, wynik wróci do „0.00”.
4. Naciśnij ponownie przycisk MEM, aby przywołać zapisaną wartość. Na wyświetlaczu obok wyniku pojawi się MEM. Wartość zostanie zachowana nawet po wyłączeniu wagi.
5. Aby wrócić do trybu ważenia, ponownie naciśnij przycisk MEM.
6. Zapisywanie wartości można powtórzyć po każdym pomiarze. Nowo zapisana wartość zastąpi poprzedni wynik.
7. Po zmianie baterii ostatnio zapisana wartość zostanie usunięta. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku MEM, wyświetli się komunikat o błędzie „Err”.

Waga niemowlęca

ADE M 10618

Zmiana jednostki

Jednostkę ważenia (kg, lb) można wybrać, naciskając przycisk UNIT.

Funkcja TARE

Niniejsza funkcja pozwala na zważenie dziecka wraz z innymi przedmiotami (np. pieluchą, ręcznikiem, itd). Wyświetlony pomiar dziecka nie będzie uwzględniał wagi przedmiotów.

- Włączyć wagę i poczekać aż wyświetli się „0.00”.
- Położyć przedmiot (np. pieluchę, ręcznik) na szali.
- Nacisnąć przycisk **TARE**. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się '0.00'.
- Zdjąć przedmiot z wagi. Na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna.
- Położyć dziecko oraz ważony przedmiot na wadze.
- Wyświetlona wartość jest wagą samego dziecka.
- Jeśli waga całkowita tarowanych przedmiotów jest większa niż 5 kg, ładowność wagi zmniejszy się o daną wartość.

Informacje o błędach:

- Komunikat „o.Ld” oznacza, że przekroczona została maksymalna dopuszczalna waga (20 kg). Natychmiast zdjąć wszystkie przedmioty z wagi. Przeładowanie może spowodować poważne uszkodzenia.
- Komunikat „Lo” oznacza, że baterie są słabe i należy je wymienić.

Czyszczenie i konserwacja

Bezpieczeństwo

- Ostrożnie!! Waga jest urządzeniem precyzyjnym.
- Nie rzucać ani nie skakać na wadze.
- Używać wyłącznie na równej, twardej powierzchni.
- Dzieci mogą być ważone wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Wagę przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Niniejszy produkt nie jest i nie może być używany jako zabawka.

Czyszczenie

- Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki lub zwykłych środków dezynfekujących. Nie należy używać silnych środków czyszczących.
- Upewnij się, że ani woda ani środki czyszczące nie dostały się do urządzenia. Mogłoby to spowodować poważne uszkodzenia.

Gwarancja – odpowiedzialność

Firma ADE naprawi lub wymieni niniejszy produkt w ciągu 2 lat od daty dostawy w razie uszkodzeń spowodowanych błędem materiału bądź wykonania (konieczne jest przedstawienie faktury). Wszystkie akcesoria – baterie, kable, elementy sieciowe, akumulatory, etc. - nie są objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają również naturalne zużycie, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem. W razie uszkodzenia w czasie transportu, reklamacja urządzenia na gwarancji może być przyjęta, jeśli zostało ono przesłane, opakowane i zabezpieczone tak, jak oryginalnie. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie zostało otwarte przez osoby nieautoryzowane przez firmę ADE.

Waga niemowlęca

ADE M 10618

Deklaracja zgodności

Niniejszy produkt spełnia wymagania Dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej zgodności elektromagnetycznej.

Dane techniczne

Waga maksymalna:	20 kg
Dokładność podziałki:	5 g
Wyświetlacz:	30 mm LCD
Jednostki ważenia:	kg/lb
Funkcje:	Memory (pamięć) i Tare (tarowanie)
Zasilanie:	4 x LR6 / AA 1.5 V (nie dołączone)
Wymiary:	600 x 385 x 85 mm
Szala:	600 x 280 x 40 mm
Masa:	ok. 2.6 kg

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	



...for your health



Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37

Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl **internet:** www.novamed.pl



ADE
germany
a different experience.

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: serwis@novamed.pl
KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

