

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl


**Nebulizator do zatok
FLAEM Rhino Clear**

**Nebulizator do oczyszczania zatok
RHINO CLEAR[®]**



Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nebulizator do zatok FLAEM Rhino Clear

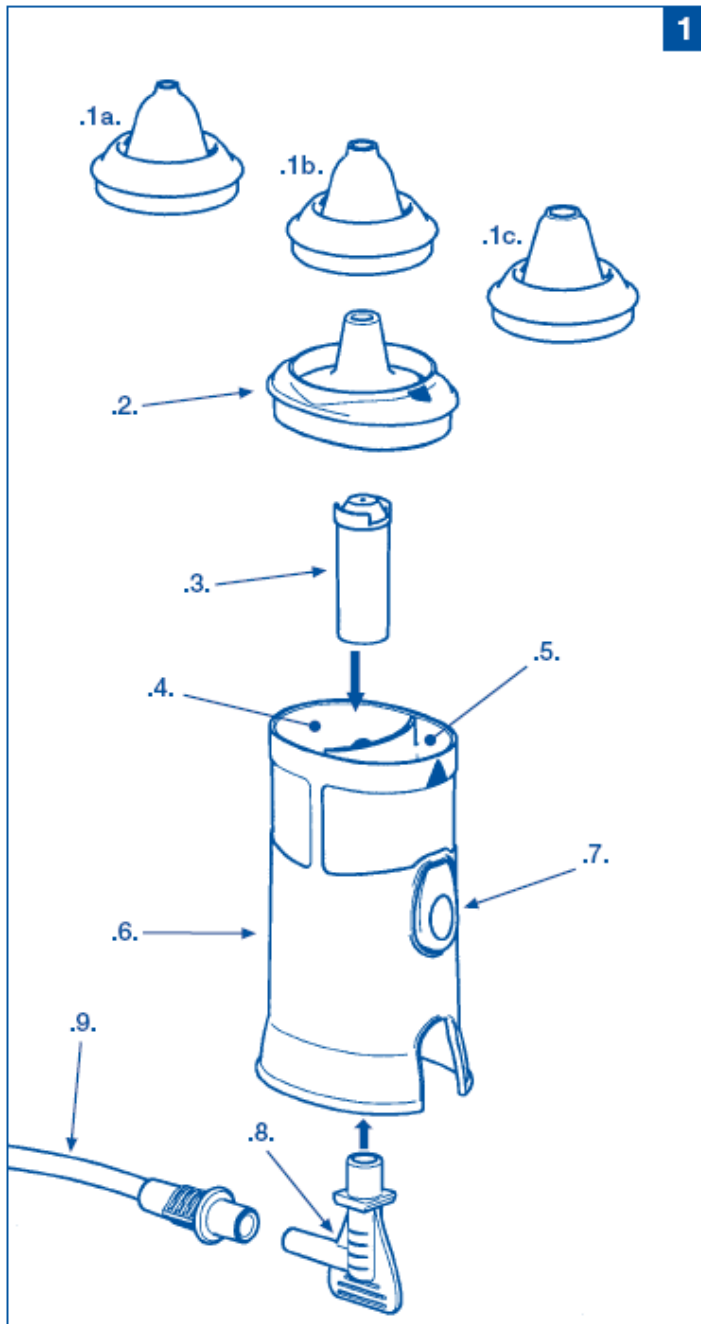

1 ELEMENTY NEBULIZATORA (rys. 1):

1a) Przezroczysta końcówka do nosa przeznaczona dla dzieci do 3 roku życia

1b) Biała końcówka do nosa przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 12 lat

1c) Niebieska końcówka do nosa przeznaczona dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia

2) Separator

3) Dysza

4) Komora na roztwór, pojemność maks. 10 ml

5) Komora na śluz


6) Obudowa nebulizatora

7) Przycisk nebulizatora

8) Złącze

9) Przewód łączący nebulizator z kompresorem

UWAGA: Przewód łączący (9) nie wchodzi w skład zestawu Rhino Clear®. Użyj przewodu dołączonego do inhalatora.

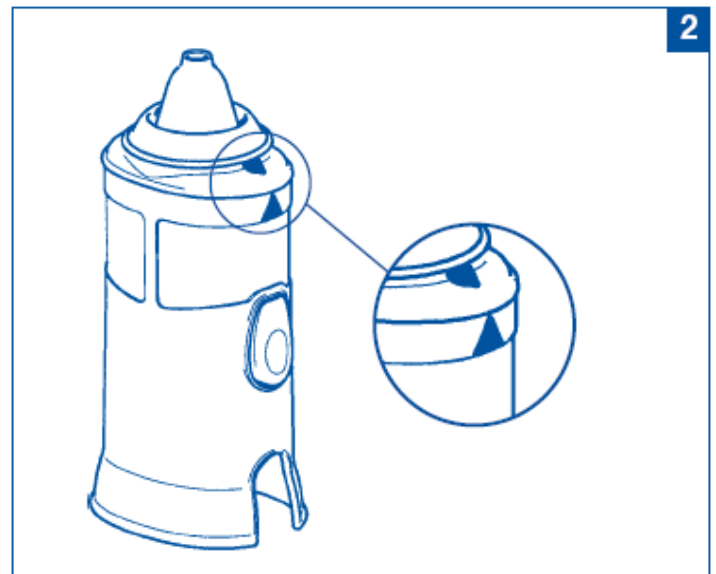

2

RHINO CLEAR®

Nebulizator do oczyszczania zatok

Gratulujemy zakupu produktu firmy Flaem Nuova. Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta, dlatego oferujemy najnowocześniejsze systemy do leczenia chorób górnych dróg oddechowych. Pozostałe produkty dostępne są na stronie www.flaemnuova.it

Rhino Clear® jest szybkim, skutecznym urządzeniem do oczyszczania i leczenia jamy nosowej i nosowo-gardłowej. Rhino Clear® rozpyla 10 ml roztworu w ciągu 2 minut.

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek. Urządzenie powinno być używane zgodnie z instrukcją.

UWAGA

Urządzenie jest wyrobem medycznym do użytku domowego i należy go używać wyłącznie z przepisanyimi lekami.

- Nebulizator może być używany z roztworami soli (izotonicznymi, hipertonicznymi, liposomowymi, itd.), wodami termalnymi oraz lekami powszechnie dostępnymi w aptekach. Roztwór do codziennego oczyszczania jamy nosowej może być również przygotowany w domu – wystarczy rozpuścić łyżeczkę soli w ½ litra letniej wody pitnej. W przypadku chorób takich jak mukowiscydoza lub w okresie rekonwalescencji po operacji zaleca się używanie wody sterylizowanej lub przegotowanej
- Rhino Clear® może być używany z całą gamą produktów do inhalacji firmy Fleam. W przypadku użycia innych urządzeń, skuteczność działania Rhino Clear® nie jest gwarantowana.
- Przed użyciem Rhino Clear® sprawdzić, czy wszystkie elementy są wyczyszczone i poprawnie podłączone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed każdym użyciem nebulizatora należy umyć ręce i wyczyścić Rhino Clear® jak opisano w punkcie „Mycie i dezynfekcja”. W czasie zabiegu zaleca się użycie środków ochronnych przeciwko przemoczeniu.

- 1) Zdejmij końcówkę do nosa (1) oraz separator (2).
- 2) Nalej roztwór (maks. 10 ml) do komory (4) z założoną dyszą (3).
- 3) Nałóż separator (2). Sprawdź, czy strzałka na nebulizatorze wskazuje strzałkę na separatorze (rys.2).

Dopasuj odpowiednią dla siebie końcówkę do nosa (1a/1b/1c).

- 4) Podłącz przewód (9) do złącza Rhino Clear® (8).
- 5) Włącz urządzenie.
- 6) Przysuń nebulizator jak najbliżej nosa i podstaw końcówkę do jednego z otworów nosowych.
- 7) Podczas oczyszczania jednego otworu nosowego przytrzymaj palcem drugie nozdrze, aby zamknąć otwór nosowy.
- 8) Wdychając powietrze, naciśnij przycisk nebulizatora (7), aby rozpocząć oczyszczanie. Puść przycisk przed zrobieniem wydechu; aby lepiej oczyścić jamę nosową ze śluzu, delikatnie wypuść powietrze bezpośrednio do nebulizatora Rhino Clear®
- 9) Przyłóż nebulizator do drugiego otworu nosowego. Powtórz czynności opisane w punktach 6–8. Spróbuj rozdzielić roztwór równo między dwa otwory nosowe.
- 10) W przypadku dzieci lub osób chorych, które nie są w stanie wykonać wszystkich czynności opisanych w punkcie 8 zaleca się przerwę ok 20 sekund między oczyszczaniem otworów nosowych, co pozwala na opróżnienie komory na śluz.
- 11) Procedura opisana powyżej przydatna jest do oczyszczania jamy nosowej za pomocą roztworów fizjologicznych. Przed przeprowadzeniem zabiegu przy użyciu leków zaleca się oczyszczenie jamy nosowej roztworem fizjologicznym. Dzięki temu lek będzie skuteczniej rozprowadzony.
- 12) Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie. Wyczyść i/lub zdezynfekuj urządzenie zgodnie z punktem „Czyszczenie i dezynfekcja”.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Umyj wszystkie elementy Rhino Clear® w zmywarce lub zamocz je w gorącej wodzie z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie dobrze wypłucz.

Wszystkie akcesoria (oprócz przewodu) mogą być dezynfekowane w następujący sposób:

- a) gotowanie w naczyniu (maks. 5 minut)
- b) zamoczenie w roztworze wody i octu (¾ wody i ¼ octu); wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nebulizator do zatok FLAEM Rhino Clear

Wysusz i złóż nebulizator zgodnie z rysunkiem na str. 1 (rys. 1).

Sterylizacja: Wszystkie elementy Rhino Clear® (oprócz przewodu) sterylizuj w autoklawie w temperaturze 120 st.C, zgodnie z instrukcją producenta autoklawu.

UWAGA!!

Zanieczyszczenie bakteryjne: Aby uniknąć zakażenia, zaleca się, aby każdy domownik używał własnego Rhino Clear®. Nebulizator dostępny jest w czterech kolorach.

Interakcje: materiały, które wchodzi w kontakt z lekami zostały przetestowane z szeroką gamą leków. Jednak skutek ciągłej ewolucji leków nie można wykluczyć chemicznych interakcji. Dlatego raz otwarty lek powinien być zużyty jak najszybciej. Należy unikać wydłużonego kontaktu leku z nebulizatorem.

Materiały: Elementy Rhino Clear® zostały wykonane z materiałów nietoksycznych.

Warunki pracy: temperatura min.: 10 st.C, max. 40 st.C
wilgotność powietrza: min 10%, max. 95%

Warunki przechowywania: temperatura min.: - 25 st.C, max. 70 st.C
wilgotność powietrza: min 10%, max. 95%RH

Ciśnienie atmosferyczne pracy/przechowywania: min. 690 hPa; max. 1060 hPa

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

kartagwarancyjna

- Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez formularz www.novamed.pl/reklamacja
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA I PODPIS
SPRZEDAJĄCEGO