

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Stetoskop
MDF

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Cechy charakterystyczne dla wszystkich stetoskopów MDF:

- w pełni obrotowy zawór akustyczny
- ręcznie wykonany
- program dożywotnych części zamiennych
- ulepszona akustyka
- oliwki MDF zapewniają doskonałą akustykę i długotrwały komfort pracy
- precyzyjnie wykonany bardzo wytrzymały
- materiał przewodu o bardzo dużej gęstości, nie skleja się, nie kruszeje, nie zawiera lateksu
- nieziębiące obwódki zwiększają wzmocnienie akustyczne i izolację
- membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk



Informacje ogólne: Stetoskopy MDF zostały zaprojektowane jako nieinwazyjne medyczne instrumenty do osłuchiwania serca i odgłosów płuc dokonywanego na zdrowej skórze w okolicach klatki piersiowej. Z uwagi na funkcję wzmacniania dźwięków, stetoskop może spowodować uszkodzenie słuchu użytkownika, jeżeli jest używany w innym niż medyczny cel. Nie pozostawiaj stetoskopu bez nadzoru w zasięgu dzieci.

Warunki ogólne użytkowania: Lira stetoskopów MDF jest anatomicznie dopasowana, aby zapewnić komfort użytkowania i doskonałą transmisję dźwięków. Lira stetoskopu powinna być zakładana oliwkami skierowanymi od siebie (jeżeli trzymasz stetoskop przed sobą).

Instrukcja użytkowania:

1. Najpierw włóż obie końcówki liry stetoskopu do uszu.
2. Delikatnie dotknij głowicę palcem. Jeżeli słyszysz czysty dźwięk oznacza to, że stetoskop jest gotowy do pracy.
3. Jeżeli nie słyszysz stuknięcia, obróć głowicę o 180 stopni aż będzie słyszalne kliknięcie – wówczas głowica stetoskopu jest we właściwej pozycji (dotyczy stetoskopów dwustronnych).
4. Dotknij palcem jeszcze raz. Będziesz słyszał stuknięcia oznaczające gotowość przyrządu do użycia.
5. Teraz można przystąpić do badania pacjenta.
6. Powtórz w/w czynności przed badaniem następnej klatki piersiowej.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Stetoskop
MDF

Czyszczenie i konserwacja: Stetoskop powinien zostać dokładnie wyczyszczony przed każdym użyciem. Głowicę, przewód i oliwki czyść czystą ściereczką lub użyj waciku zamoczonego w skażonym alkoholu lub w roztworze alkoholu izopropylowego, aby doczyścić zabrudzone elementy. Unikaj długotrwałej ekspozycji przewodu na nadmierne ciepło, zimno, rozpuszczalniki, wilgoć oraz oleje/tłuszcze (ukryte w ludzkiej skórze).

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów jest dwuletnia gwarancja.



kartagwarancyjna

Novamed® Sp. Z o.o. Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz, tel. (42) 719 00 46 udziela gwarancji na prawidłowe działanie stetoskopów MDF na okres 2 lat od daty sprzedaży.

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	