

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl


Nawilżacz parowy
FLAEM HIPPO

Nawilżacz parowy
HIPPO




Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

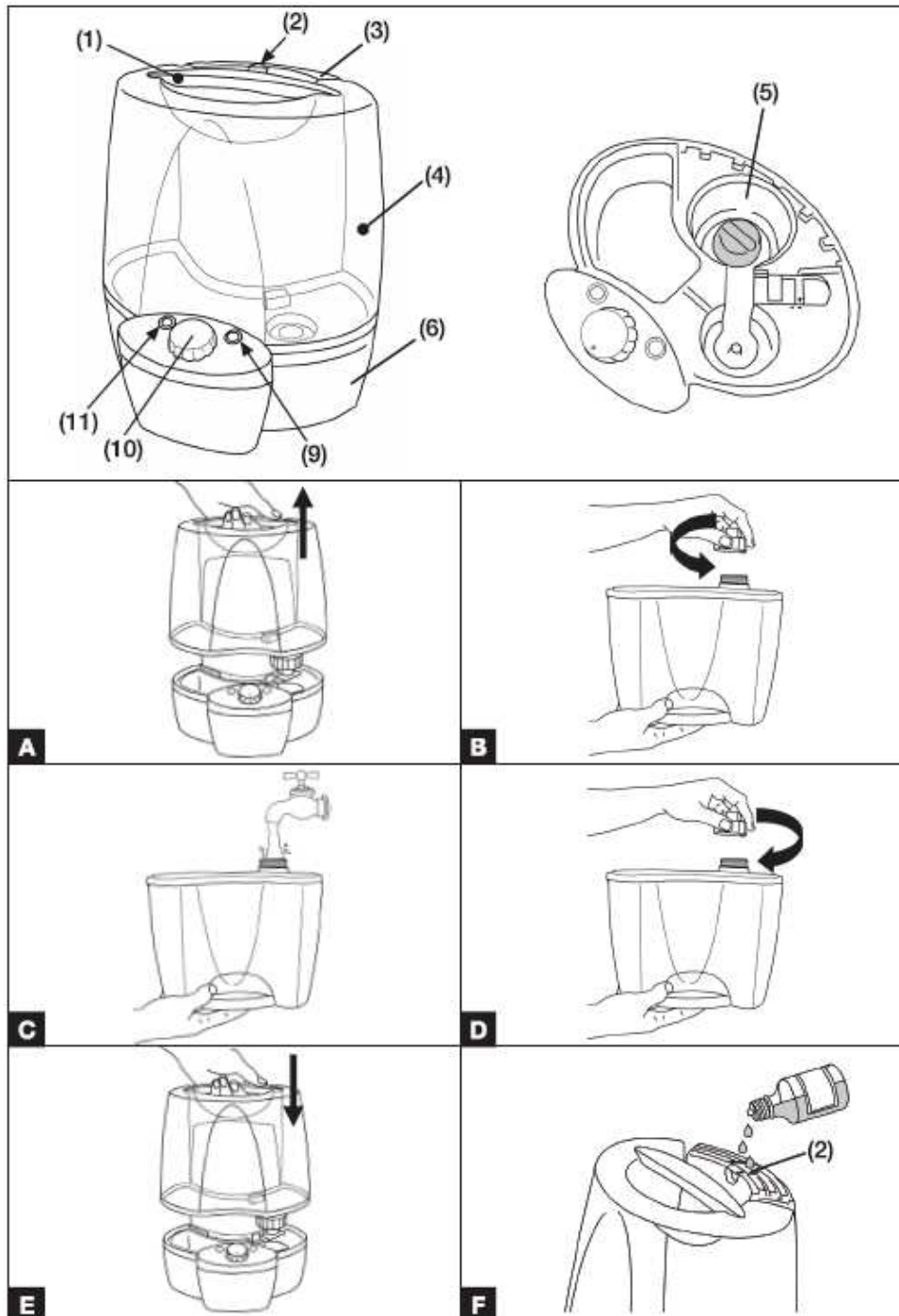

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

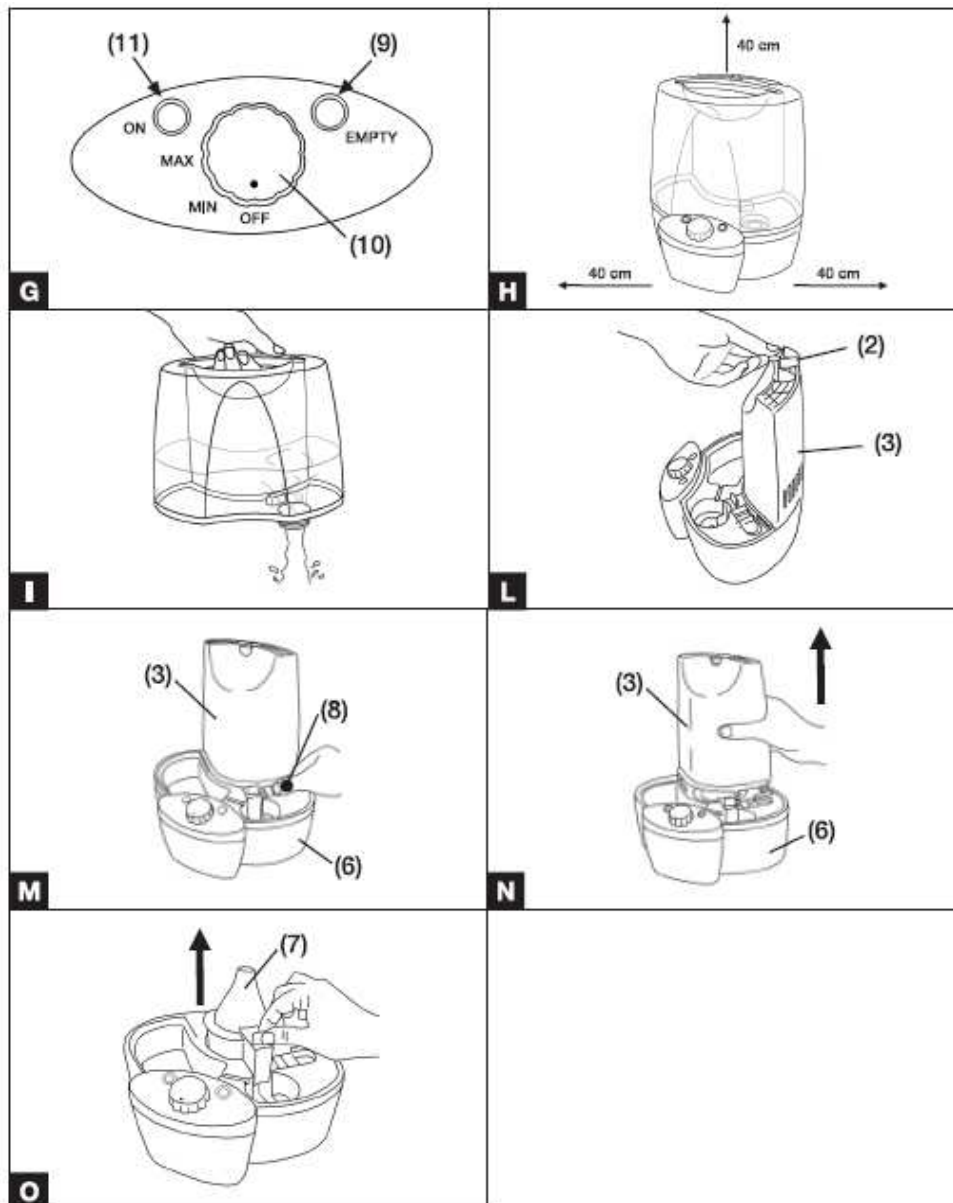

HIPPO DELUXE Nawilżacz parowy

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu i dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo naszą firmę.

Wszystkie produkty dostępne są na naszej stronie internetowej
www.flaemnuova.it.

Przed użyciem nawilżacza prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek.

Urządzenie powinno być używane zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.

ELEMENTY NAWILŻACZA

1. Uchwyt pojemnika na wodę.
2. Pojemniczek na olejki aromatyczne.
3. Dysza; schładzanie wychodzącej pary.
4. Pojemnik na wodę (max. pojemność 3.8 litra).
5. Komora parowa.
6. Podstawa.
7. Stożek stężenia pary.
8. Zablokowanie/odblokowanie dyszy.
9. Wskaźnik poziomu wody (PUSTY).
10. Pokrętko regulacji prędkości (OFF/MIN/MAX).
11. Wskaźnik działania (ON).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Złap uchwyt (1) pojemnika na wodę (4) i wyjmij pojemnik z podstawy (6). - rys. A
2. Odkręć zakrętkę na spodzie pojemnika obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. B). Napełnij pojemnik zimną wodą z kranu (nie więcej niż 400C - max. 3.8 litra). Po napełnieniu dobrze zakręć zakrętkę. (rys. D).
3. Ostrożnie połóż pojemnik z wodą na podstawę (rys. E).
4. W razie potrzeby nalej olejki aromatyczne do pojemniczka (2) – rys. F.
5. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem nawilżacza i podłącz kabel.
6. Aby włączyć nawilżacz, przekręć pokrętko (10) na pozycję MIN (mniejsza ilość pary) lub pozycję MAX (większa ilość pary). Wskaźnik działania (11) powinien zaświecić się na zielono (rys. G).
7. Po ok. 4 minutach podgrzewania, nawilżacz zaczyna wydzielać parę.
8. UWAGA: Strumień pary nie powinien być skierowany na żadne przedmioty, podłogę ani ściany (rys. H).
9. Kiedy pojemnik na wodę jest pusty, wskaźnik (9) zaświeci się na czerwono i para przestanie wylatywać.
10. Wyłącz nawilżacz, obracając pokrętko na pozycję OFF. Odłącz kabel i poczekaj ok. 15 minut przed ponownym napełnieniem pojemnika na wodę.
11. Po każdym użyciu wypłucz pojemnik na wodę (rys. I).

Uwaga!

Para ma temperaturę wrzenia. Nie podchodź zbyt blisko strumienia pary. Trzymaj nawilżacz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko poparzeń!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem nawilżacza odłącz go z prądu i odczekaj 15 minut aż nawilżacz ostygnie. Chronić nawilżacz przed kurzem i brudem (np. trzymając go w plastikowej torbie). Jeśli nie będziesz używał nawilżacza przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu.

Konserwacja codzienna

- Wyjmij pojemnik na wodę z podstawy (6) i kilka razy dokładnie wypłucz ciepłą wodą. Wypłucz pojemnik przed każdym użyciem. Przetrzyj pojemnik na wodę miękką ściereczką.
- Wyjmij pojemniczek na olejki aromatyczne (2) z dyszy (3) – rys. L

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

- Odblokuj dyszę (3) i wyjmij z podstawy (6) – rys. M i N. Wyszuszyć pojemniczek na olejki aromatyczne, dyszę powietrza/pary oraz stożek stężenia pary (7) i wyczyścić wilgotną ściereczką – rys. O.
- Wyczyścić podstawę wilgotną ściereczką. Przed wysuszeniem, upewnij się, że podgrzewacz oraz komora parowa ostygły.

Uwaga: Nie używaj mocnych środków czystości ani szczotek. Jeśli nawilżacz nie jest używany, nie zostawiaj wody w pojemniku – może to spowodować rozwój bakterii w pojemniku.

Konserwacja cotygodniowa

- Dokładnie wyczyścić nawilżacz zgodnie z instrukcją zamieszczona w punkcie „konserwacja codzienna”.
- Wyjmij pojemnik na wodę (4), dyszę (3) oraz stożek (7) i wypłucz wodą z octem (25% octu/75% wody). Następnie dobrze wypłucz wodą.
- Osusz pojemnik na wodę. Napełnij pojemnik roztworem octu (25% - 950ml) i wody (75% - 2850ml) i pozostaw na 20 min, potrząsając mocno pojemnikiem od czasu do czasu, aby usunąć cały osad. Po 20 minutach wylej roztwór i dokładnie wypłucz pojemnik.
- Napełnij komorę parową (5) roztworem octu (50%) i wody (50%) i pozostaw na 20 min.
- Następnie wylej roztwór i osusz komorę miękką wilgotną ściereczką. UWAGA: Nie zanurzaj ani nie płucz podstawy (6) w wodzie.
- Do czyszczenia nie używaj wełny stalowej ani żadnych silnych środków do szorowania.
- Dobrze wysusz wszystkie elementy.
- Złóż nawilżacz zgodnie z instrukcją.

Dezynfekcja stożka i pojemnika na wodę:

- Raz w tygodniu dokładnie wyczyścić nawilżacz za pomocą roztworu środka do dezynfekcji (electrolytic chloroxidant) i wody (1 łyżeczka środka chemicznego na 3.7 litrów wody). Częściowo napełniaj pojemnik na wodę roztworem i zostaw na 20 minut, potrząsając mocno pojemnikiem od czasu do czasu. Następnie wylej roztwór i dokładnie wypłucz pojemnik czystą wodą.
- Stożek, pojemniczek na olejki oraz dyszę można bezpiecznie czyścić w zmywarce, ale tylko na górnym koszu.

Zakończenie czyszczenia

- Wykonaj czynności zawarte w punkcie „Konserwacja cotygodniowa”. Przed złożeniem upewnij się, że wszystkie elementy nawilżacza są suche.
- Nie dociskaj pokrywki pojemnika na wodę, aby nie przykleiła się do uszczelki.
- Po dłuższym okresie przechowywania, wyczyścić pojemnik i podstawę.



Sprzęt gospodarstwa domowego przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego; nie używać w celach handlowych, przemysłowych, itd.

Nawilżacza używać zgodnie z instrukcją. Użycie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem może spowodować pożar lub porażenie prądem. Przed użyciem nawilżacza HIPPO DELUXE sprawdź, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzenia na urządzeniu ani na kablu. Jeżeli zauważysz jakieś uszkodzenia, NIE UŻYWAJ nawilżacza – skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym.

Aby uniknąć ryzyka poparzeń, nawilżacz HIPPO DELUXE może być używany wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, które zapoznały się z niniejszą instrukcją. Nie używać nawilżacza w pobliżu dzieci, osób niepełnosprawnych lub zwierząt.

UWAGA: BARDZO GORĄCA PARA!!

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

- Przechowuj elementy opakowania (np. plastikowe torebeczki) w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nie ciągnij urządzenia za kabel. Nie zwijaj kabla wokół urządzenia. Nie dotykaj kabla mokrymi rękoma; nie przesuwaj ani nie włączaj urządzenia, kiedy jesteś na boso.
- Nie włączaj urządzenia w pobliżu wanny, zlewów ani pojemników na wodę; nie wystawiaj na działanie wilgoci lub deszczu. Nie zanurzaj podstawy w wodzie i upewnij się, że woda nie przedostała się wewnątrz podstawy. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyjmij kabel z gniazdka, a dopiero potem wyjmij urządzenie z wody. Nie używaj ponownie urządzenia dopóki nie zostanie naprawione przez autoryzowany serwis.
- Nie używaj zasilaczy o innym napięciu niż opisane na etykiecie na spodzie urządzenia. Nie podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego (DC).
- Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i wodoodpornej powierzchni. Nie ustawiaj bezpośrednio na meblach, dywanach ani parkietach. Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych lub warunków atmosferycznych. Nie ustawiaj strumienia pary na meble, ściany i podłogi. Nie przenoś ani nie ruszaj urządzenia podczas pracy; uważaj, aby nie wejść na urządzenie.
- Nie zastawiaj ani nie blokuj wylotów powietrza. Otwory wentylacyjne powinny być czyste. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory.
- Urządzenia z pojemnikiem na wodę mogą powodować problemy związane z wyciekaniem wody. Przed użyciem sprawdź, czy pokrywka pojemnika na wodę jest dobrze zamknięta, pojemnik nie jest uszkodzony ani pęknięty, zawór zamyka się prawidłowo.
- Nie używać gorącej wody. Pojemnik napełniać wyłącznie zimną wodą z kranu.
- Nie używać urządzenia, jeśli pojemniczek na olejki nie znajduje się na swoim miejscu. Nie przepełniaj pojemniczka na olejki, ponieważ nadmiar olejków może dostać się do pojemnika na wodę. Wystarczy kilka kropli olejku, aby uzyskać żądany efekt.
- Nie dodawać lekarstw do pojemnika na wodę ani pojemniczka na olejki. Nie dodawać olejków aromatycznych do pojemnika na wodę.
- Przed włączeniem złożyć wszystkie elementy zgodnie z instrukcją.
- Przed czyszczeniem lub ponownym napełnianiem wodą poczekać aż urządzenie ostygnie. Wylać resztkę wody i przepłukać pojemnik przed uzupełnieniem wody.
- Po zakończeniu używania wylać resztkę wody i wytrzeć urządzenie.
- Regularnie przeprowadzaj czynności opisane w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”.
- Producent, sprzedawca oraz importer są odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu tylko, jeśli: a) używane jest zgodnie z instrukcją; b) parametry elektryczne są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Naprawy nieautoryzowane są jednoznaczne z utratą gwarancji i mogą być niebezpieczne dla użytkownika.

DANE TECHNICZNE

Nawilżacz nadaje się do pomieszczeń do 25m².

Napięcie: 230V~ 50Hz 260W

Pojemnik: ok. 3.8 litra

Czas pracy: do 24 godzin (przy ustawieniu mocy na MIN)

Wymiary (cm): 27 x 22 x 32

Waga (przed napełnieniem pojemnika): 1.85 kg

Wyprodukowany zgodnie z EN 60335-2-98:2003

stosowany w połączeniu z 60335-1:2002+A11:2004

Zatwierdzenia



Semko-GS

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pokrętko nastawione jest na pozycje MIN lub MAX, ale wskaźnik działania (11) nie świeci się.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Podłącz kabel do gniazdka.
	Nie ma zasilania w gniazdku.	Sprawdź, czy w gniazdku jest prąd, podłączając inne urządzenie.
Nawilżacz nie wytwarza pary.	Nie ma wody w pojemniku na wodę.	Napełnij pojemnik wodą.
	Urządzenie nie stoi na równej powierzchni.	Postaw urządzenie na równej, płaskiej powierzchni.
	Na podgrzewaczu lub stożku jest osad.	Wyczyść podgrzewacz i stożek.
	Pojemnik na wodę został wyczyszczony detergentem.	Dokładnie wypłucz pojemnik czystą wodą i wytrzyj.
Wilgoć osadza się wokół nawilżacza lub na oknach.	Zbyt duża moc pary w stosunku do wielkości lub poziomu wilgotności pomieszczenia.	Zmniejsz poziom mocy, nastawiając pokrętko na pozycje MIN lub otwierając drzwi. Aby sprawdzić poziom wilgotności w pomieszczeniu, użyj zwykłego higrometru.
Świeci się czerwony wskaźnik poziomu wody (9).	Pojemnik na wodę jest pusty.	Napełnij pojemnik wodą. Wyjmij kabel z gniazdka, wyłącz urządzenie, i odczekaj ok. 15 minut aż ostygnie. Następnie podłącz kabel i włącz urządzenie.
	Po uzupełnieniu wody urządzenie nie zostało wyłączone i nie zdążyło ostygnąć.	Wyjmij kabel z gniazdka, wyłącz urządzenie, i odczekaj ok. 15 minut aż ostygnie. Następnie podłącz kabel i włącz urządzenie.
Woda wydostaje się z urządzenia.	Pojemnik na wodę może przeciekać.	Przed każdym użyciem sprawdź, czy pokrywa jest szczelnie zamknięta, pojemnik nie jest pęknięty ani uszkodzony, a zawór dobrze się zamyka.
	Pojemnik na wodę jest zbyt luźno zamocowany.	Dociśnij pojemnik.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

Symbole

~ Prąd zmienny



Uwaga: zapoznaj się z instrukcją

Kompatybilność elektromagnetyczna:

Nawilżacz **HIPPO DELUXE** spełnia aktualne wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Jeśli stwierdzisz zakłócenia z TV, radio lub innym sprzętem elektrycznym, przenieś inhalator w inne miejsce aż zakłócenia ustaną. Można również spróbować podłączyć inhalator do innego gniazdka.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i funkcjonalnych urządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia.

kartagwarancyjna

Nawilżacz parowy FLAEM HIPPO

Novamed[®] Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz, tel: (42) 719 00 46
udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na **okres 5 lat od daty sprzedaży.**

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	