

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Termometr jest przeznaczony wyłącznie do mierzenia temperatury ciała!

Aby pomiar był prawidłowy należy trzymać termometr w miejscu pomiaru do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Termometr zawiera drobne części, baterie itp. które mogą być połknięte przez dzieci. Przechowywać termometr w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić termometr przed uderzeniami i upadkami.

Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (powyżej 60⁰C). Nie gotować termometru!

Do czyszczenia używać wyłącznie środków opisanych w punkcie „Czyszczenie i dezynfekcja”. Nie dezynfekować, jeśli termometr jest uszkodzony.

Uwaga: Baterie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WŁĄCZANIE TERMOMETRU

Aby włączyć termometr, należy wcisnąć przycisk ON/OFF umieszczony obok wyświetlacza. Krótki sygnał dźwiękowy zasygnalizuje, że termometr jest włączony. Po włączeniu przeprowadzony zostanie krótki test wyświetlacza. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 32⁰C, wyświetli się symbol „L” oraz zacznie migać „C” w prawej górnej części wyświetlacza. Termometr jest gotowy do użycia.

UŻYWANIE TERMOMETRU

Podczas pomiaru wyświetlana jest aktualna temperatura i miga symbol „C”. Jeśli w ciągu 16 sekund temperatura nie wzrośnie więcej niż o 0.1⁰C, wynik uważa się za stabilny i wiarygodny. Jeżeli słychać 4 krótkie sygnały dźwiękowe a znaczek „C” przestał pulsować, znaczy to, że pomiar został zakończony i można odczytać temperaturę. UWAGA! Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączać termometr po każdym użyciu. Termometr wyłącza się automatycznie po około 10 minutach.

PRZECHOWYWANIE POMIARU

Włączyć termometr, przytrzymując przycisk ON/OFF przez min. 3 sekundy. Wyświetli się wynik ostatniego pomiaru. Po ok. 3 sekundach wartość ostatniego pomiaru zniknie. Można teraz przeprowadzić kolejny pomiar i zachować nowy wynik.

METODY POMIARU

Doustna

Umieścić termometr pod językiem; sensor termometru musi mieć dobry kontakt z powierzchnią języka. Zamknąć usta i oddychać przez nos. Przed pomiarem należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Czas pomiaru: około 1 minuty.

Doodbytnicza

Jest to najbardziej wiarygodna metoda pomiaru w szczególności zalecana dla małych dzieci. Ostrożnie wsunąć końcówkę termometru na głębokość 2 centymetrów w otwór odbytniczy. Czas pomiaru: około 1 minuty.

Pod pachą

Z medycznego punktu widzenia ta metoda jest najmniej dokładna. Metoda ta nie powinna być stosowana w razie potrzeby otrzymania precyzyjnych wyników pomiaru. Czas pomiaru: około 1 minuty.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Nazwa: 70% alkohol etylowy

Mieszanina z wodą: 95.0 %

Nie używać silnych środków czyszczących, rozcieńczalników, benzenu. Nie zanurzać termometru w wodzie ani innych płynach.

Wypłukać.

WYMIANA BATERII

Jeśli z prawej dolnej strony wyświetlacza pojawi się symbol słabej baterii lub należy wymienić baterie. Otworzyć przegródkę na baterie. Wymienić baterie na nowe tego samego typu (zgodnie z polaryzacją). Baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	Termometr elektroniczny
Zakres pomiaru:	32.0°C do 42.0°C
Dokładność pomiaru:	± 0.1°C pomiędzy 35.5°C a 42 °C
Wyświetlacz:	Ciekłokrystaliczny (LCD) trzycyfrowy. najniższa wyświetlana wartość: 0.1°C
Pamięć:	Przechowuje ostatnią zmierzoną wartość
Temperatura przechowywania:	-10 ⁰ C do +60 ⁰ C
Baterie:	1.5V
Zgodność ze standardami:	EN 12470-3:2000, Clinical Thermometers

GWARANCJA

karta gwarancyjna

Urządzenie objęte jest **2-letnią** gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.

W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.

Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.

Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.

Koszty transportu pokrywa użytkownik.

Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.

Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Uwaga: Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA I PODPIS
SPRZEDAJĄCEGO