

### ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Termometr jest przeznaczony wyłącznie do mierzenia temperatury ciała!

Aby pomiar był prawidłowy należy trzymać termometr w miejscu pomiaru do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Termometr zawiera drobne części, baterie itp. które mogą być połknięte przez dzieci. Przechowywać termometr w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić termometr przed uderzeniami i upadkami.

Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (powyżej 60°C). Nie gotować termometru!

Do czyszczenia używać wyłącznie środków opisanych w punkcie „Czyszczenie i dezynfekcja”. Nie dezynfekować, jeśli termometr jest uszkodzony.

**Uwaga: Baterie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

### WŁĄCZANIE TERMOMETRU

Aby włączyć termometr, należy wcisnąć przycisk ON/OFF umieszczony obok wyświetlacza. Krótki sygnał dźwiękowy zasygnalizuje, że termometr jest włączony. Po włączeniu przeprowadzony zostanie krótki test wyświetlacza. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 32<sup>0</sup>C, wyświetli się symbol „Lo” oraz zaczną migać „C” w prawej górnej części wyświetlacza. Termometr jest gotowy do użycia.

### UŻYWANIE TERMOMETRU

Podczas pomiaru wyświetlana jest aktualna temperatura i miga symbol „C”. Jeśli w ciągu 16 sekund temperatura nie wzrośnie więcej niż o 0.1<sup>0</sup>C, wynik uważa się za stabilny i wiarygodny. Jeżeli słychać 10 krótkich sygnałów dźwiękowych a znaczek „C” przestał pulsować, znaczy to, że pomiar został zakończony i można odczytać temperaturę. UWAGA! Aby przedłużyć żywotność baterii, należy wyłączać termometr po każdym użyciu. Termometr wyłącza się automatycznie po około 10 minutach.

### PRZECHOWYWANIE POMIARU

Włączyć termometr, przytrzymując przycisk ON/OFF przez min. 3 sekundy. Wyświetli się wynik ostatniego pomiaru oraz mały symbol „M” z prawej strony wyświetlacza. Ok. 3 sekundy po puszczeniu przycisku ON/OFF, wartość ostatniego pomiaru zniknie. Można teraz przeprowadzić kolejny pomiar i zachować nowy wynik.

### METODY POMIARU

#### Doustna

Umieścić termometr pod językiem; sensor termometru musi mieć dobry kontakt z powierzchnią języka. Zamknąć usta i oddychać przez nos. Przed pomiarem należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Czas pomiaru: około 1 minuty.

#### Doodbytnicza

Jest to najbardziej wiarygodna metoda pomiaru w szczególności zalecana dla małych dzieci. Ostrożnie wsunąć końcówkę termometru na głębokość 2 centymetrów w otwór odbytniczy. Czas pomiaru: około 1 minuty.

#### Pod pachą

Z medycznego punktu widzenia ta metoda jest najmniej dokładna. Metoda ta nie powinna być stosowana w razie potrzeby otrzymania precyzyjnych wyników pomiaru. Czas pomiaru: około 1 minuty.

### CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

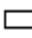

Nazwa: 70% alkohol etylowy

Mieszanina z wodą: 95.0 %

Nie używać silnych środków czyszczących, rozcieńczalników, benzenu. Nie zanurzać termometru w wodzie ani innych płynach.

Wypłukać.

### WYMIANA BATERII

Jeśli z prawej dolnej strony wyświetlacza pojawi się symbol słabej baterii  lub  należy wymienić baterie. Otworzyć przegródkę na baterie. Wymienić baterie na nowe tego samego typu (zgodnie z polaryzacją). Baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	Termometr elektroniczny
Zakres pomiaru:	32.0°C do 42.0°C
Dokładność pomiaru:	± 0.1°C pomiędzy 35.5°C a 42 °C
Wyświetlacz:	Ciekłokrystaliczny (LCD) trzycyfrowy. najniższa wyświetlana wartość: 0.1°C
Pamięć:	Przechowuje ostatnią zmierzoną wartość
Temperatura przechowywania:	-10 <sup>0</sup> C do +60 <sup>0</sup> C
Baterie:	1.5V
Zgodność ze standardami:	EN 12470-3:2000, Clinical Thermometers

## karta gwarancyjna

### GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest **2-letnią** gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.
- **Uwaga: Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	