

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,  
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37  
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku  
email: [biuro@novamed.pl](mailto:biuro@novamed.pl) internet: [www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

# ThermoFlash<sup>®</sup>



*Clinically tested and approved  
ASTM 1965-1998 (2003)*

### I. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Urządzenie nadaje się do użytku do domowego.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Używać w temperaturze otoczenia między 10 – 40°C.
- Przechowywać w czystym, suchym miejscu.
- Nie wystawiać na działanie wstrząsów elektrycznych.
- Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C lub poniżej 20°C.
- Nie używać, jeśli wilgotność przekracza 85%.
- Szkiełko ochronne nad soczewką jest najdelikatniejszą częścią termometru.
- Nie dotykać szkiełka palcami.
- Szkiełko czyścić wacikiem lekko namoczonym alkoholem 70%.
- Nie wystawiać termometru na działanie promieni słonecznych i wody.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie rzucać.
- W razie problemów skontaktować się z dystrybutorem. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie.

#### **WAŻNE!!**

- Baterie włożyć zgodnie z polaryzacją.
- Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

### II. WSTĘP

Termometr bezdotykowy **ThermoFlash LX-26** firmy Visiomed używa najnowszej technologii podczerwieni. Pozwala to na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości 5 cm.

Dokładny, szybki i bezdotykowy termometr ThermoFlash LX-26 umożliwi wygodny i bezpieczny pomiar temperatury. Udowodniono, że pomiar temperatury tętnicy skroniowej jest dokładniejszy od pomiaru temperatury w uchu i lepiej tolerowany od pomiaru temperatury w odbycie.

Jednakże, jak w przypadku wszystkich termometrów, uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników zależy od właściwego użytkowania. Dlatego przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

### III. PRZED UŻYCIEM

**Termometr ThermoFlash jest fabrycznie skalibrowany. Nie potrzeba kalibrować urządzenia przed użyciem.**

By otrzymać wiarygodne i stabilne wyniki, w przypadku znaczącej zmiany warunków otoczenia należy odczekać 15-20 minut przed pomiarem, aby termometr przyzwyczaił się do temperatury otoczenia.

Przed kolejnym pomiarem należy odczekać 1 minutę.

### IV. ZASADY DZIAŁANIA

Każde ciało stałe, płynne czy gaz wydziela energię poprzez promieniowanie. Siła promieniowania zależy od temperatury ciała. Termometr ThermoFlash LX-26 mierzy temperaturę ciała na podstawie

energii, którą wydziela człowiek. Pomiar jest możliwy dzięki zewnętrznemu czujnikowi, który cały czas analizuje i rejestruje temperaturę otoczenia. Dlatego pomiar temperatury ciała nie jest zakłócony przez temperaturę otoczenia.

### Różne metody pomiaru temperatury

#### ***Pomiar temperatury wnętrza ciała***

Jest to najbardziej dokładna metoda pomiaru temperatury, którą wykonuje się poprzez pomiar temperatury tętnicy płucnej. Do pomiaru służy cewnik zakończony czujnikiem termicznym. Ta sama metoda wykorzystywana jest przy pomiarze temperatury przetyku. Jednakże, tak inwazyjne metody pomiaru temperatury wymagają specjalistycznego sprzętu i personelu medycznego.

#### ***Pomiar temperatury w odbycie***

Temperatura w odbycie wolno dostosowuje się do temperatury wnętrza ciała. Zaobserwowano, że temperatura w odbycie pozostaje podwyższona przez dłuższy czas po tym, jak temperatura wnętrza ciała zaczyna spadać i odwrotnie. Metoda ta może również prowadzić do urazów odbytnicy, a bez odpowiednich technik sterylizacji termometry mogą przenosić bakterie występujące w kale.

#### ***Pomiar temperatury w ustach***

Na temperaturę w ustach łatwo wpływają przyjmowane posiłki, napoje oraz oddychanie przez usta. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, usta muszą być zamknięte przez cały czas pomiaru a język obniżony na ok. 3-4 minuty, co może być kłopotliwe w przypadku młodszych dzieci.

#### ***Pomiar temperatury pod pachą***

Niniejsza metoda pomiaru jest stosunkowo prosta, jednak nie dostarcza dokładnych wyników temperatury wewnętrznej dzieci. Pomimo niskiej czułości i niedokładnych wyników pomiaru, metoda ta zalecana jest przez Amerykańską Akademię Pediatrów do przeprowadzania testów przesiewowych w przypadku noworodków.

#### ***Pomiar temperatury w uchu***

Aby uzyskać dokładne wyniki, należy bardzo dobrze obsługiwać termometr. Czujnik musi być umieszczony jak najbliżej najcieplejszej części wewnętrznego kanału usznego. Nieprawidłowe umieszczenie czujnika może prowadzić do otrzymania błędnych wyników.

### ***Zakres prawidłowej temperatury według różnych metod pomiaru***

<b>Metoda pomiaru</b>	<b>Temperatura prawidłowa</b>
W odbycie	36.6°C - 38°C
W ustach	35.5°C – 37.5°C
Pod pachą	34.7°C – 37.3°C
W uchu	35.8°C - 38°C
Tętnica skroniowa (ThermoFlash)	35.8°C – 37.8°C

Temperatura ciała waha się w ciągu dnia i może być uzależniona od czynników takich, jak: wiek, płeć, rodzaj i grubość skóry, itd.

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

### Zalety pomiaru temperatury tętnicy skroniowej

Temperatura może być mierzona na czole, w okolicy tętnicy skroniowej. Udowodniono, że technologia podczerwieni pozwala na otrzymanie dokładniejszych wyników i jest lepiej tolerowana od metody pomiaru w odbycie.

Termometr ThermoFlash LX-26 został zaprojektowany tak, aby uzyskać natychmiastowe wyniki bez dotykania tętnicy skroniowej. Ponieważ tętnica skroniowa znajduje się blisko powierzchni skóry a przepływ krwi jest stały i regularny, pomiar umożliwia otrzymanie bardzo dokładnych wyników. Dokładność, szybkość i wygoda niniejszej metody pomiaru sprawia, że jest ona lepsza od pozostałych metod.

### Zakres prawidłowej temperatury w zależności od wieku

Wiek	°C	°F
0 – 2 lata	36.4 – 38.0	97.5 – 100.4
3 – 10 lat	36.1 – 37.8	97.0 – 100.0
11 – 65 lat	35.9 – 37.6	96.6 – 99.7
> 65 lat	35.8 – 37.5	96.4 – 99.5

### Praktyczne wskazówki wykonywania pomiaru

- Aby uzyskać dokładne wyniki pomiaru, użytkownik powinien dobrze zaznajomić się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Należy pamiętać, że pomimo iż procedury pomiaru mogą być proste, nie należy ich lekceważyć.
- Pomiar należy wykonywać w warunkach neutralnych, w temperaturze pokojowej. Nie wykonywać pomiaru po wysiłku fizycznym.
- Należy pamiętać, że temperatura ciała waha się. Temperatura wzrasta o ok. 0.5°C pomiędzy godzina 3 rano a 6 po południu. Kobiety zazwyczaj mają temperaturę wyższą o ok. 0.2°C, również w trakcie cyklu miesięczkowego temperatura waha się: wzrasta o ok. 0.5°C w drugiej fazie cyklu i na początku ciąży.
- Podczas siedzenia temperatura jest niższa o ok. 0.3 – 0.4°C niż podczas stania.

### POMIAR TEMPERATURY

Wymierz termometr w kierunku czoła, nad prawą tętnicą skroniową, w odległości ok. 5 cm. Naciśnij przycisk mierzenia, temperatura wyświetla się natychmiast.



Wiarygodność pomiaru nie jest gwarantowana, jeśli pomiar wykonywany jest nad inną częścią ciała (ramieniem, klatką piersiową, itd.)



### UWAGA

Przed wykonaniem pomiaru:


- Usunąć włosy i wytrzeć pot z czoła.
- Unikać przeciągów.
- Przed kolejnym pomiarem odczekać 1 minutę.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,  
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37  
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku  
email: [biuro@novamed.pl](mailto:biuro@novamed.pl) internet: [www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

- W przypadku znaczącej zmiany warunków otoczenia należy odczekać 15-20 minut przed pomiarem, aby termometr przyzwyczał się do temperatury otoczenia.

### V. OPIS TERMOMTERU THERMOFLASH LX-26

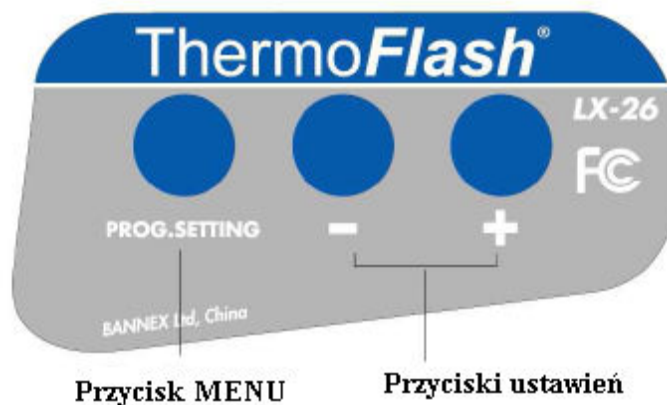

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,  
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37  
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku  
email: [biuro@novamed.pl](mailto:biuro@novamed.pl) internet: [www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

Znak handlowy

IEC60417-5840  
Część aplikacyjna typu B



IEC60417-5031  
Prąd stały

## VI. FUNKCJE

1. Specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej.
2. Szybkie i niezawodne wyniki dzięki użyciu systemu na podczerwień HEIMMANN.
3. Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury.
4. Pamięć ostatnich 32 pomiarów.
5. Podświetlany monitor LCD.
6. Pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
7. Automatyczne wyłączenie (oszczędzanie baterii)
8. Mały, poręczny, prosty w użyciu.

### **Dodatkowe zastosowania**

ThermoFlash LX-26 może być również stosowany do mierzenia temperatury pokarmu w butelce, temperatury wody do kąpieli lub temperatury pokojowej (dzięki funkcji „Surface Temp” (Temperatura Powierzchni). Funkcja ta jest zgodna z Dyrektywą 89/336/EEC - „Kompatybilność elektromagnetyczna”.

## VII. OBSŁUGA

1. Włóż baterie.
2. Przed pierwszym użyciem lub po wymianie baterii odczekaj ok. 10 minut aż urządzenie rozgrzeje się.
3. Wymierz termometr w kierunku czoła w odległości ok. 5 cm, naciśnij przycisk mierzenia, temperatura wyświetli się w ciągu 1 sekundy. Pomiar można wykonać również z tyłu płatka ucha.
4. Przed pomiarem usunąć włosy i pot czoła.

### VIII. FUNKCJE MENU

#### 1. Wybór jednostki pomiaru – funkcja F1

Naciśnij przycisk PROG SETTING przez 3 sekundy, na ekranie wyświetli się F1. Aby ustawić jednostkę pomiaru Celsjusza, naciśnij przycisk „-”, aby ustawić jednostkę pomiaru Fahrenheita, naciśnij przycisk „+”. Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk PROG SETTING.

#### 2. Ustawienie alarmu – F2 menu

Naciśnij przycisk PROG SETTING przez 3 sekundy, na ekranie wyświetli się F1. Naciśnij przycisk PROG SETTING dwa razy, aby wyświetliło się F2.

Naciśnij przycisk „+”, aby podnieść próg temperatury o 0.1°C lub przycisk „-”, aby obniżyć próg o 0.1°C. Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk PROG SETTING.

**Uwaga: Domyślnie próg alarmu ustawiony jest na temperaturę 38°C.**

#### 3. Wybór trybu wyświetlacza: **BODY (temp. ciała) lub SURFACE (temp. powierzchni) – F3**

ThermoFlash LX-26 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała ludzkiego. W tym celu, użyj trybu BODY (CIAŁO).

Zasięg pomiaru dla trybu BODY ( CIAŁO ) wynosi : 32°C – 42.9°C

Możesz także używać ThermoFlash LX-26 do pomiaru temperatury powierzchni, przedmiotów, jedzenia, płynów lub temperatury pokojowej.

W tym celu wybierz tryb SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI).

Zasięg pomiaru dla trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI) wynosi:  
0°C – 60°C

Naciśnij przycisk „PROG SETTING” przez 3 sekundy, na ekranie wyświetli się F1.

Naciskaj przycisk „PROG SETTING” aż wyświetli się F3.

Naciskając przycisk ‘-’, wybierz 0, by wybrać tryb BODY (CIAŁO).

Naciskając przycisk „+”, wybierz 1, by wybrać tryb SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI).

Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk PROG SETTING.

**Uwaga: Domyślnie ustawiony jest tryb BODY.**

**Ważne:** Temperatura powierzchni różni się od wewnętrznej temperatury ciała. Aby uzyskać wewnętrzną temperaturę ciała, ustaw tryb BODY.

Upewnij się, że podczas pomiaru temperatury ciała używasz trybu BODY, a podczas pomiaru temperatury powierzchni (butelek, wody w wannie, temperatury pokojowej) używasz trybu SURFACE.

#### 4. Różnica temperatur – F4 menu

**Dostosowanie Thermoflash LX-26 w przypadku różnicy temperatury.**

Naciśnij przycisk „PROG SETTING” przez 3 sekundy, na ekranie wyświetli się F1.

Naciskaj przycisk „PROG SETTING” aż wyświetli się F4.

Naciskaj przycisk ‘+’, by zwiększyć różnicę o 0.1°C lub przycisk ‘-’, by zmniejszyć o 0.1°C.

Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk „PROG SETTING”.

W razie wątpliwości zostaw różnicę na poziomie 0.8°C (ustawienie domyślne).


W przypadku znaczącej zmiany warunków otoczenia należy odczekać 15-20 minut przed pomiarem, aby termometr przyzwyczaił się do temperatury otoczenia.

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

### **5. Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego – F5 menu**

Naciśnij przycisk „PROG SETTING” przez 3 sekundy, na ekranie wyświetli się F1.

Naciskaj przycisk „PROG SETTING” aż wyświetli się F5.

Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć sygnał (pojawi się ikonka ) lub przycisk „-”, aby wyłączyć sygnał (ikonka zniknie).

Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk PROG SETTING.

### **6. Wyjście z trybu ustawień**

Naciśnij przycisk PROG SETTING aż ekran się wyłączy.

### **7. Pamięć danych**

Aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.

Aby odczytać poprzednie wyniki, naciskaj kolejno przycisk „+”. Numer, który pojawia się między wynikami oznacza, numer pomiaru. Aby powrócić do poprzedniego wyniku, naciśnij przycisk „-”.

Aby wyjść z trybu zapisanych pomiarów, naciśnij przycisk mierzenia. Termometr wyłączy się po ok. 5 sekundach.

### **8. Wymiana baterii.**

Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Battery” (bateria), należy wymienić baterie.

Otwórz przegródkę na baterie i wymień baterie zgodnie z polaryzacją. Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Nie używać akumulatorów. Używać wyłącznie baterii jednorazowych.

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

### IX. DANE TECHNICZNE

1. Normalne warunki
  - Zakres temperatur: 10° C - 40° C (50° - 140° F)
  - Wilgotność: ≤ 85%
2. Zasilanie: DC3 V (2 baterie AA)
3. Wymiary: 196 x 150 x 50 mm
4. Waga: 220 g
5. Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1° C (0.1°F)
6. Zasięg pomiaru:
  - trybu BODY (CIAŁO): 32°C – 42.9°C (90° to 109°F)
  - trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI): 0°C – 60°C (32°F to 140°F)
7. Dokładność: ± 0.3° C (0.54°F)
8. Zużycie energii: ≤ 50mW
9. Odległość dla pomiarów: 5 cm – 8 cm (2 in – 3.14 in)
10. Automatyczne wyłączenie: 5 sekund

#### DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW THERMOFLASH

Od 34°C do 35.9°C = ± 0.3°C Od 93.2°F do 96.6°F = ± 0.3°F	Zgodnie z normą ASTM E1965-1998 (2003)
Od 36°C do 39°C = ± 0.2°C From 96.8°F to 102.2°F = ± 0.2°F	
Od 39°C do 42.5°C = ± 0.3°C Od 102.2°F do 108.5°F = ± 0.3°F	

Termometr ThermoFlash LX-26 może dokonywać pomiarów temperatury poniżej 32°C lub powyżej 42.9°C (90°F to 109°F), ale dokładność pomiarów poza zasięgiem nie jest gwarantowana.

#### TRWAŁOŚĆ UŻYCIA THERMOFLASH

Trwałość termometru ThermoFlash gwarantowana jest na co najmniej 40.000 pomiarów.

### X. UWAGA

- Ochronne szkiełko soczewki jest najważniejszą i najdelikatniejszą częścią termometru; zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania.
- Czyść szkiełko wacikiem bawełnianym nasączonym wodą lub 70% alkoholem.
- Nie używaj baterii innych niż wskazane; nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania; nie wrzucaj baterii do ognia.
- Wyjmij baterie, jeśli termometr nie będzie używany przez długi okres czasu.
- Nie wystawiaj termometru na działanie słońca i wody.
- Uderzenie czy upadek zniszczy termometr.

### XI. AKCESORIA

- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja
- Etui
- Baterie AA

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,  
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37  
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku  
email: [biuro@novamed.pl](mailto:biuro@novamed.pl) internet: [www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)

## Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-26

### XII. USUWANIE USTEREK

W razie problemów podczas używania ThermoFlash LX-26, skorzystaj z poradnika poniżej. Jeśli problem nadal istnieje, proszę skontaktować się z dystrybutorem.

#### **Ekran wyświetla wysokość temperatury 95°**

Temperatura prawdopodobnie ustawiona jest w stopniach Fahrenheita, zmień jednostkę pomiaru na stopnie Celsjusza ( naciskając przycisk PROG SETTING aż wyświetli się F1)

#### **Ekran wyświetla temperatura ciała 32°C (89.6°F)**

Aby wykonać pomiar temperatury ciała, termometr musi być ustawiony na tryb BODY (CIAŁO). Jeśli termometr jest ustawiony na tryb SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI), temperatura 32°C oznacza zewnętrzną temperaturę, która wydziela ciało.

#### **Ekran wyświetla informację HI**



Podczas używania ThermoFlash LX-26 na ekranie może pojawić się informacja **HI**. Oznacza to, że temperatura wynosi powyżej zasięgu pomiaru, zarówno dla trybu BODY (CIAŁO) - powyżej 42.9°C (109°F), jak i dla trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI) - powyżej 60°C (140°F).

#### **Ekran wyświetla informację LO**



Podczas używania ThermoFlash LX-26 na ekranie może pojawić się informacja **LO**. Oznacza to, że temperatura wynosi poniżej zasięgu pomiaru, zarówno dla trybu BODY (CIAŁO) - poniżej 32°C (90°F), jak i dla trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI) - poniżej 0°C (32°F).

Informacja ta może wyświetlać się w następujących sytuacjach:

Przyczyny wyświetlania informacji LO	Rada
Pomiar temperatury zakłócają włosy, pot...	Upewnij się, że nie ma żadnych wspomnianych przeszkód, aby zmierzyć temperaturę.
Pomiar temperatury zakłóca wilgotne powietrze.	Upewnij się, czy powietrze nie jest zbyt wilgotne, ponieważ może to zakłócać system na podczerwień.
Pomiary temperatury zostały zrobione w zbyt krótkich odstępach czasu, ThermoFlash nie miał czasu by się zresetować.	Zachowaj przerwę minimum 15 sekund pomiędzy dwoma pomiarami – zaleca się oczekiwanie 1 minuty.
Odległość pomiaru jest zbyt duża.	Zachowaj wskazaną odległość do robienia pomiaru – pomiędzy 5 a 8 cm.

## GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest **2-letnią gwarancją od daty zakupu** w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

**Uwaga: Gwarancja traci ważność w przypadku rozmontowania urządzenia lub nieprawidłowego użytkowania. Należy zachować kartę gwarancyjną.**

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	



*...for your health*



**Biuro Handlowe:** Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,  
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37

**Infolinia:** 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku  
**email:** [biuro@novamed.pl](mailto:biuro@novamed.pl) **internet:** [www.novamed.pl](http://www.novamed.pl)



**ADE**  
germany  
*a different experience.*

Serwis: Novamed Sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 3 95-100 Zgierz, email: [serwis@novamed.pl](mailto:serwis@novamed.pl)  
KRS: 0000185258 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, NIP: 732-10-04-353.

